

Директор ООО «BIRUNINEOFARM»

Ташмухамедов А.Э.

«24» октября 2025 г.

**Инструкция по применению****Дезинфицирующего средства «BNF-DEZ EXTRA»**

**Описание:** дезинфицирующее средство «BNF-DEZ EXTRA» представляет собой концентрат бесцветной окраски, хорошо смешивается с водой. Форма выпуска - концентрат.

**Состав:** четвертичные аммониевые соединения (ЧАС): Дидецилдиметиламмония хлорид -6,4%, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид 6,4%, третичный амин: Додecilдипропилентриамин -2,1%, другие функциональные компоненты и вода очищенная;

**Область применения:** Раствор дезинфицирующего средства используется для дезинфекции и очистки, изделий медицинского назначения из пластмасс, резин, стекла, коррозионностойких материалов (включая хирургические и стоматологические инструменты, не имеющие дефектов и повреждений покрытия), для дезинфекции поверхностей в помещениях жесткой мебели, предметов ухода за больными, посуды, белья, уборочного инвентаря, обуви, детских игрушек, способами: протирания, погружения, орошения или замачивания в медицинских учреждениях, фармацевтическом производстве, школах, дошкольных учреждениях, службах общественного питания, организациях здравоохранения, объектах любой специализации. Это необходимо для минимизации рисков передачи заболеваний от одного пациента к другому или к медицинскому персоналу, для предотвращения загрязнений продукции микроорганизмами и обеспечения безопасности рабочих условий. Дезинфекция может проводиться в домашних условиях для обеспечения чистоты и гигиены.

**Приготовление рабочих растворов** Растворы дезинфицирующего средства «BNF-DEZ UNIVERSAL» готовят в емкости из любого материала. Средство

**ВНИМАНИЕ!** Растворы средства для обработки и дезинфекции, в том числе как при совмещенной, так и при отдельной, для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения любых объектов ручным способом могут быть использованы многократно в течение 14 дней, если их внешний вид не изменился. При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора, выпадение осадка и т.п.) раствор необходимо заменить до истечения указанного срока.

**Таблица № 1**

**Приготовление рабочих растворов**

| Концентрация раствора по препарату (%) | Количество средства (мл) и воды (мл), необходимые для |       |                         |        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------|--------|
|                                        | 1 л. рабочего раствора                                |       | 10 л. рабочего раствора |        |
|                                        | средство                                              | вода  | средство                | вода   |
| 0,2                                    | 2,0                                                   | 998,0 | 20,0                    | 9980,0 |
| 0,25                                   | 2,5                                                   | 997,5 | 25,0                    | 9975,0 |
| 0,4                                    | 4,0                                                   | 996,0 | 40,0                    | 9960,0 |
| 0,5                                    | 5,0                                                   | 995,0 | 50,0                    | 9950,0 |
| 1,0                                    | 10,0                                                  | 990,0 | 100,0                   | 9900,0 |
| 1,5                                    | 15,0                                                  | 985,0 | 150,0                   | 9850,0 |
| 2,5                                    | 25,0                                                  | 975,0 | 250,0                   | 9750,0 |
| 3,0                                    | 30,0                                                  | 970,0 | 300,0                   | 9700,0 |

**Примечание:** Категорически запрещается смешивать Дезинфицирующее средство с другими моющими и дезинфицирующими средствами.

**Спектр активных действий:**

- **бактерицидная** направлен на уничтожение вегетативных форм бактерий.
- **вирулицидная** нацелен на уничтожение вирусов;
- **фунгицидная** уничтожающим грибковые микроорганизмы;
- **спроцидным** действующим против спор бактерий и грибов;

**Способ применения**

Рабочие растворы Дезинфицирующего средства применяют для дезинфекции

поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, жесткой мебели, предметов ухода за больными, посуды, белья, уборочного инвентаря, резиновых коврик, обуви, изделий медицинского назначения и др. способами протирания, погружения, орошения или замачивания.

### **Дезинфекция поверхностей (режимы)**

- **бактерицидная, фунгицидная** (грибы дрожжевые (*Candida albicans*), грибы плесневые (*Aspergillus niger*), дерматофиты (*T.rubrum*)) - 0,2% - 60мин 2,0%-45мин.
- **вирулицидная** (вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов, в том числе гепатита А, В, и С, ВИЧ, всех штаммов вирусов гриппа, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии», полиомиелита и вирусов герпеса) – 0,1% - 30мин;
- **спороцидным** (*Aspergillus niger* (грибы плесневые), *Trichophyton rubrum*, *Microsporum canis*) – 3,0%-45мин
- **Туберкулоцидным** (микобактерии туберкулеза; возбудителей особо-опасных инфекций: легионеллеза).- 0,5% - 30мин

**Предметы ухода за больными**, средства личной гигиены, игрушки, спортивный инвентарь, резиновые и полипропиленовые коврики полностью погружают в дезинфицирующий раствор или протирают ветошью, смоченной в растворе средства. Объем дезинфицируемых предметов должен занимать 2/3 от объема рабочего раствора Дезинфицирующего средства. По окончании дезинфекции предметы ухода ополаскивают проточной водой в течение 3-5 мин.

• **Поверхности в помещениях** (предметы обстановки, пол, стены, крупногабаритное оборудование и др.), жесткую мебель, санитарно-техническое оборудование обрабатывают протирочным материалом, смоченным в рабочем растворе Дезинфицирующего средства, или орошают из гидропульта, автомакса, распылителя и др.

Смывание рабочего раствора средства с обработанных поверхностей после дезинфекции не требуется.

После проведения дезинфекции способом орошения помещение проветривают в течение 15 минут.

После дезинфекции поверхностей, имеющих контакт с пищевыми продуктами, их промывают питьевой водой и вытирают насухо.

• **Дезинфекцию воздуха** проводят путем распыления рабочего раствора на время

экспозиции.

Предварительно проводят очистку и дезинфекцию поверхностей и оборудования, помещение герметизируют; закрывают окна и двери, отключают приточно-вытяжную вентиляцию. После экспозиции остаток рабочего раствора удаляют с поверхностей и оборудования сухой ветошью, помещения проветривают в течение 30 минут.

- **Генеральные уборки.** При проведении генеральной уборки или заключительной дезинфекции в эпидемических очагах необходимо руководствоваться режимами эффективными против микроорганизмов, вызывающих данную инфекцию. В хирургических, акушерско-гинекологических стационарах, процедурных кабинетах, клинических лабораториях генеральную уборку производят по вирулицидному режиму; в инфекционных стационарах – по режиму соответствующей инфекции. После окончания генеральной уборки или заключительной дезинфекции не требуется проветривание помещений.

- **Столовую посуду** освобождают от остатков пищи и погружают в рабочий раствор ДС в зависимости от режима обеззараживания, из расчета 5 л на 1 комплект так, чтобы слой раствора над ними был не менее 1 см с последующим ополаскиванием под проточной водой в течении 3-5 минут. Другие поверхности и предметы, предполагаемые к контакту с пищевыми продуктами, тщательно промывают (несколько раз) питьевой водой.

- **Белье** замачивают в емкости с рабочими растворами Дезинфицирующего средства на время экспозиции, затем стирают. Расход: 5 л рабочего раствора Дезинфицирующего средства на 1 кг сухого белья.

- **Обувь** (внутреннюю поверхность) дважды протирают тампоном, обильно смоченным ДС. После экспозиции обработанную поверхность протирают ветошью, обильно смоченной водой, и высушивают. Банные сандалии, тапочки обеззараживают способом погружения в раствор, препятствуя их всплытию. После дезинфекции их ополаскивают водой.

- **Уборочный материал** (протирачная ветошь) замачивают в рабочем растворе, после чего ее простирывают в этом же растворе, выполаскивают и высушивают.

#### **Меры предосторожности:**

К работе со средством допускаются лица старше 18 лет, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Не рекомендуется допускать к работе лиц с повышенной чувствительностью к химическим средствам и страдающих аллергическими

заболеваниями;

При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды, затем принять 10-20 измельченных таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать!

При необходимости обратиться к врачу;

При несоблюдении мер предосторожности и при попадании концентрата средства в глаза и на кожу возможно проявление местно-раздражающего действия в виде гиперемии и отека слизистой оболочки глаз, слезотечения и эритемы на коже;

При попадании средства в глаза немедленно промыть их под струей воды в течение 15 минут, при появлении гиперемии – закапать 20% или 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу;

При контакте с кожей промыть его большим количеством воды.

**Условия хранения:**

Средство следует хранить в герметичной упаковке производителя при температуре от +10°C до +25°C, в темном, сухом месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов в местах, недоступных детям.

**Срок годности:** дезинфицирующего средства - 5 лет. Средство выпускается в пластмассовых емкостях по 5 л. и 10 л.

**Сведения о производителе и его уполномоченном представителе:**

Производитель: ООО «BIRUNINEOFARM» («БИРУНИНЕОФАРМ»)

Юридический (фактический) адрес: ООО «BIRUNINEOFARM» Республика Узбекистан, г. Ташкент, Янгихаётский район, ул. Райхон, 1-проезд, 77. Тел.: +998 88 138 25 00. e-mail: [birunineofarm@gmail.com](mailto:birunineofarm@gmail.com)

Претензии принимаются по адресу: ООО «BIRUNINEOFARM» Республика Узбекистан, г. Ташкент, Янгихаётский район, ул. Райхон, 1-проезд, 77. Тел.: +998 88 138 25 00. e-mail: [birunineofarm@gmail.com](mailto:birunineofarm@gmail.com)