

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «BIRUNINEOFARM»
Ташмухамедов А.Э.
«24» октября 2025 г.

Инструкция по применению

Дезинфицирующего средства «BNF-DEZ UNIVERSAL»

Описание: дезинфицирующее средство «BNF-DEZ UNIVERSAL» представляет собой концентрат бесцветной окраски, хорошо смешивается с водой. Форма выпуска - концентрат.

Состав: Четвертичные аммониевые соединения (ЧАС): Алкилдиметил-бензиламмоний хлорид 3,7%, третичный амин: Додецилдипропилентриамин 2,1%, поверхностно активные вещества, вспомогательные компоненты и воду очищенную.

Область применения: Дезинфицирующее средство применяется в медицинских учреждениях для дезинфекции помещений, медицинского и стоматологического оборудования (для минерализации рисков передачи заболеваний от одного к другому пациенту или к медицинскому персоналу). Общественные места: Дезинфекция проводится в общественных местах, таких как школы, детские сады, рестораны, отели, торговые центры. Общественный транспорт и т.д. Дезинфицирующее средство применяется в промышленности включая пищевую и медицинскую и фармацевтическую для предотвращения загрязнений продукции микроорганизмами и обеспечения безопасности рабочих условий. В домашних условиях. Дезинфекция может производиться в домашних условиях для обеспечения чистоты и гигиены. Например, очищение и дезинфекция кухонной поверхности для уничтожения пищевых микроорганизмов или использование средств для очистки и обработки ран.

Приготовление рабочих растворов

ВНИМАНИЕ! Растворы средства для обработки и дезинфекции, в том числе как при совмещенной, так и при отдельной, для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения любых объектов ручным способом могут быть использованы многократно в течение 14 дней, если их внешний вид не изменился. При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора, выпадение осадка и т.п.) раствор необходимо заменить до истечения указанного срока.

Таблица № 1

Приготовление рабочих растворов

Концентрация раствора по препарату (%)	Количество средства (мл) и воды (мл), необходимые для			
	1 л. рабочего раствора		10 л. рабочего раствора	
	средство	вода	средство	вода
0,2	2,0	998,0	20,0	9980,0
0,25	2,5	997,5	25,0	9975,0
0,4	4,0	996,0	40,0	9960,0
0,5	5,0	995,0	50,0	9950,0
1,0	10,0	990,0	100,0	9900,0
1,5	15,0	985,0	150,0	9850,0
2,5	25,0	975,0	250,0	9750,0
3,0	30,0	970,0	300,0	9700,0

Примечание: Категорически запрещается смешивать Дезинфицирующее средство с другими моющими и дезинфицирующими средствами.

Спектр активных действий:

- **бактерицидная** направлен на уничтожение вегетативных форм бактерий.
- **вирулицидная** нацелен на уничтожение вирусов;
- **фунгицидная** уничтожающим грибковые микроорганизмы;
- **спроцидным** действующим против спор бактерий и грибов;

Способ применения

Рабочие растворы Дезинфицирующего средства применяют для дезинфекции

поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, жесткой мебели, предметов ухода за больными, посуды, белья, уборочного инвентаря, резиновых коврик, обуви, изделий медицинского назначения и др. способами протирания, погружения, орошения или замачивания.

Дезинфекция поверхностей (режимы)

- **бактерицидная, фунгицидная** (грибы дрожжевые *Candida albicans*) – 0,2% -30мин.
- **вирулицидная** (вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов, в том числе гепатита А, В, и С, ВИЧ, всех штаммов вирусов гриппа, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии», полиомиелита и вирусов герпеса) – 2,5% - 45мин;
- **спороцидным** (*Aspergillus niger* (грибы плесневые), *Trichophyton rubrum*, *Microsporum canis*, бактерий *Clostridium* и *Bacillus*) – 3,0%-30мин;
- **Туберкулоцидным** (микобактерии туберкулеза; возбудителей особо-опасных инфекций: легионеллеза).- 0,5% - 30мин.

Для обработки поверхностей используется разбавленный (1/10) из расчета 200мл на 2л.

- **Предметы ухода за больными**, средства личной гигиены, игрушки, спортивный инвентарь, резиновые и полипропиленовые коврики полностью погружают в дезинфицирующий раствор или протирают ветошью, смоченной в растворе средства. Объем дезинфицируемых предметов должен занимать 2/3 от объема рабочего раствора Дезинфицирующего средства. По окончании дезинфекции предметы ухода ополаскивают проточной водой в течение 3-5 мин.

- **Поверхности в помещениях** (предметы обстановки, пол, стены, крупногабаритное оборудование и др.), жесткую мебель, санитарно-техническое оборудование обрабатывают протирачным материалом, смоченным в рабочем растворе Дезинфицирующего средства, или орошают из гидропульт, автомакса, распылителя и др.

Смывание рабочего раствора средства с обработанных поверхностей после дезинфекции не требуется.

После проведения дезинфекции способом орошения помещение проветривают в течение 15 минут.

После дезинфекции поверхностей, имеющих контакт с пищевыми продуктами, их

промывают питьевой водой и вытирают насухо.

- **Дезинфекцию воздуха** проводят путем распыления рабочего раствора на время экспозиции.

Предварительно проводят очистку и дезинфекцию поверхностей и оборудования, помещение герметизируют; закрывают окна и двери, отключают приточно-вытяжную вентиляцию. После экспозиции остаток рабочего раствора удаляют с поверхностей и оборудования сухой ветошью, помещения проветривают в течение 30 минут.

- **Генеральные уборки.** При проведении генеральной уборки или заключительной дезинфекции в эпидемических очагах необходимо руководствоваться режимами эффективными против микроорганизмов, вызывающих данную инфекцию. В хирургических, акушерско-гинекологических стационарах, процедурных кабинетах, клинических лабораториях генеральную уборку производят по вирулицидному режиму; в инфекционных стационарах – по режиму соответствующей инфекции. После окончания генеральной уборки или заключительной дезинфекции не требуется проветривание помещений.

- **Столовую посуду** освобождают от остатков пищи и погружают в рабочий раствор ДС в зависимости от режима обеззараживания, из расчета 5 л на 1 комплект так, чтобы слой раствора над ними был не менее 1 см с последующим ополаскиванием под проточной водой в течении 3-5 минут. Другие поверхности и предметы, предполагаемые к контакту с пищевыми продуктами, тщательно промывают (несколько раз) питьевой водой.

- **Белье** замачивают в емкости с рабочими растворами Дезинфицирующего средства на время экспозиции, затем стирают. Расход: 5 л рабочего раствора Дезинфицирующего средства на 1 кг сухого белья.

- **Обувь** (внутреннюю поверхность) дважды протирают тампоном, обильно смоченным ДС. После экспозиции обработанную поверхность протирают ветошью, обильно смоченной водой, и высушивают. Банные сандалии, тапочки обеззараживают способом погружения в раствор, препятствуя их всплытию. После дезинфекции их ополаскивают водой.

- **Уборочный материал** (протирачная ветошь) замачивают в рабочем растворе, после чего ее стирают в этом же растворе, выполаскивают и высушивают.

Меры предосторожности:

К работе со средством допускаются лица старше 18 лет, прошедшие инструктаж по

технике безопасности. Не рекомендуется допускать к работе лиц с повышенной чувствительностью к химическим средствам и страдающих аллергическими заболеваниями;

При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды, затем принять 10-20 измельченных таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать!

При необходимости обратиться к врачу;

При несоблюдении мер предосторожности и при попадании концентрата средства в глаза и на кожу возможно проявление местно-раздражающего действия в виде гиперемии и отека слизистой оболочки глаз, слезотечения и эритемы на коже;

При попадании средства в глаза немедленно промыть их под струей воды в течение 15 минут, при появлении гиперемии – закапать 20% или 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу;

При контакте с кожей промыть его большим количеством воды.

Условия хранения:

Средство следует хранить в герметичной упаковке производителя при температуре от +10°C до +25°C, в темном, сухом месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов в местах, недоступных детям.

Срок годности: дезинфицирующего средства - 5 лет. Средство выпускается в пластмассовых емкостях по 5 л. и 10 л.

Сведения о производителе и его уполномоченном представителе:

Производитель: ООО «BIRUNINEOFARM» («БИРУНИНЕОФАРМ»)

Юридический (фактический) адрес: ООО «BIRUNINEOFARM» Республика Узбекистан, г. Ташкент, Янгихаётский район, ул. Райхон, 1-проезд, 77. Тел.: +998 88 138 25 00. e-mail: birunineofarm@gmail.com

Претензии принимаются по адресу: ООО «BIRUNINEOFARM» Республика Узбекистан, г. Ташкент, Янгихаётский район, ул. Райхон, 1-проезд, 77. Тел.: +998 88 138 25 00. e-mail: birunineofarm@gmail.com